

**SCHEDE INFORMATIVA PER UTENTI ESTERNI
MODALITÀ DI INVIO DI MATERIALE CITOLOGICO**

MODALITÀ DI INVIO DEL MATERIALE PER ESAME CITOLOGICO

- I liquidi biologici devono essere inviati in contenitori a parete rigida provvisti di chiusura ermetica
- Nell'impossibilità di consegna entro l'orario previsto di accettazione il materiale deve essere conservato in frigorifero a +4°C e consegnato la mattina del giorno successivo
- I vetri strisciati devono essere puliti e provvisti di banda smerigliata dove scrivere i dati anagrafici
- L'eventuale fissazione deve avvenire:
 - o mediante IMMEDIATA immersione del vetrino in alcool 95° per 30 minuti;
 - o oppure con IMMEDIATA applicazione di citospray (in questo caso attendere che il vetro sia asciutto prima di porlo nel contenitore di trasporto)
 - o vetrini fissati all'aria
- Il materiale fissato all'aria deve essere lasciato essiccare prima di essere posto nel contenitore di trasporto
- I vetrini devono essere inviati in contenitori che ne evitino la sovrapposizione e la rottura

ISTRUZIONI PARTICOLARI per la FISSAZIONE:

- o Agoaspirati di organi superficiali e profondi, secrezioni:
1-2 vetrini essiccati all'aria e 1-2 vetrini fissati in alcool 95 o citospray
- o Broncoaspirato, liquor: nessun fissativo;
- o Liquidi biologici: a fresco nessun fissativo;(eventualmente utilizzare provette con anticoagulante);
- o Escreato: fresco;
- o Brushing: vetrini fissati in alcool 95° o citospray;
- o Pap test: 1-2 vetrini fissati in alcool 95° o citospray;
- o Urine: le seconde urine del mattino in fissativo di Esposti fornito dal laboratorio.